

B

BROCHURE

enovis™

PECA®

VIS POUR HALLUX VALGUS Ø3 / Ø4MM

HALLUX VALGUS



INDICATIONS

Les vis d'ostéosynthèse sont indiquées pour le traitement de l'arthrose, l'hallux valgus, métatarsalgie, et autres défauts d'alignement osseux (pied creux, pied plat, défaut d'alignement dû à un traumatisme antérieur).

EXEMPLE D'UTILISATION:

Traitement de l'Hallux Valgus par ostéotomies métatarsienne et phalangienne percutanées.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Les vis PECA® sont indiquées pour la fixation des ostéotomies ou le traitement des arthrodèses du pied.

Cette gamme de vis à tête biseautée, totalement filetée, permet d'offrir un montage stable en maximisant l'ancrage cortical tout en préservant les tissus mous. L'empreinte Exact2-T permet un positionnement précis de la vis lors de son insertion en percutané sous contrôle radiographique.

TÊTE BISEAUTÉE (40°)


Ancrage cortical et
préservation des tissus
mous

VIS DE NEUTRALISATION AVEC FILETAGE TOTAL - PAS CONSTANT

Assure un ancrage osseux


AUTO-TARAUDANTE & AUTO-PERFORANTE

Insertion facilitée

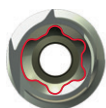

EMPREINTE EXACT2-T

Positionnement exact de la tête
de vis biseautée

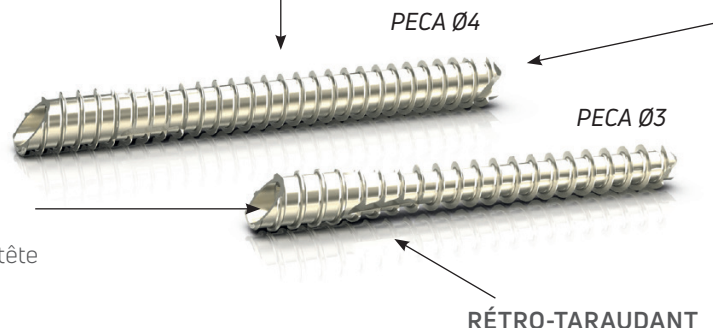

GAMME PECA®

Les vis PECA®, en alliage de titane (T6AV ELI anodisé) sont disponibles en diamètre 3 mm et 4 mm. L'instrumentation possède un code couleur pour une identification plus aisée.


CODE COULEUR DE L'INSTRUMENTATION



	Ø3mm	Ø4mm
TOURNEVIS	EXACT2-T10	EXACT2-T15
LONGUEUR	16-48mm	26-60mm
BROCHE	Ø1.2mm	Ø1.6mm
FORET	Ø2mm	Ø3.2mm

PECA® - INSTRUMENTATION PERCUTANÉE

L'ancillaire PECA® combine une instrumentation spécifique aux vis PECA® et une instrumentation percutanée pouvant être associées à des fraises percutanées stériles.

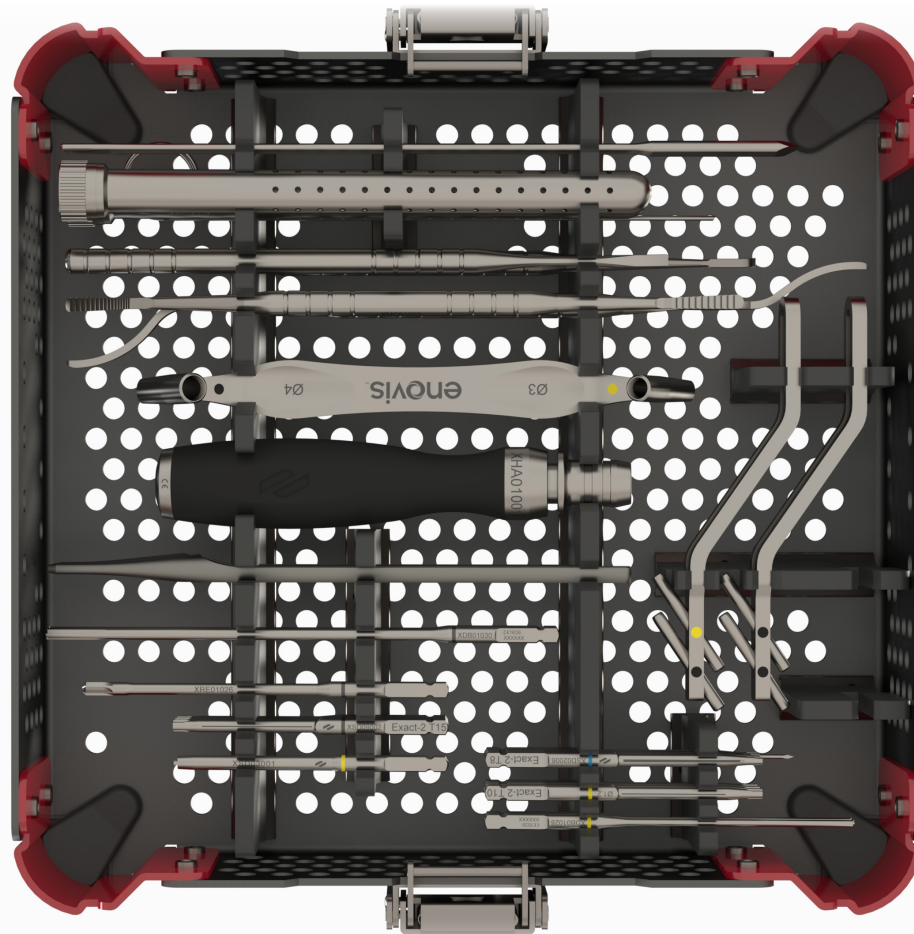

RÂPES PERCUTANÉES



RUGINE DOUBLE EMBOUT



RUGINE SIMPLE EMBOUT



LEVIER DE TRANSLATION DOUBLE
EMBOUT - OPTION




BEAVER

PECA® - INSTRUMENTATION SPÉCIFIQUE

TECHNOLOGIE EXACT2-T

Permet de déterminer la bonne orientation de la tête de vis pour être le plus anatomique possible.

EMPREINTE EXACT2-T

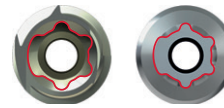

SPÉCIFIQUE

Permet le positionnement exact de la tête biseautée. Le détrompeur permet le positionnement de l'embout du tournevis dans une position unique.

UNIVERSELLE

Permet le retrait avec une instrumentation standardisée.

FRAISES PERCUTANÉES STÉRILES

Disponibles en complément de la gamme PECA®



RÉFÉRENCES

VIS POUR HALLUX VALGUS PECA®

LONGUEUR (mm)	PECA® Ø3mm	PECA® Ø4mm
16	PS070016	-
18	PS070018	-
20	PS070020	-
22	PS070022	-
24	PS070024	-
26	PS070026	PS060026
28	PS070028	PS060028
30	PS070030	PS060030
32	PS070032	PS060032
34	PS070034	PS060034
36	PS070036	PS060036
38	PS070038	PS060038
40	PS070040	PS060040
42	PS070042	PS060042
44	PS070044	PS060044
46	PS070046	PS060046
48	PS070048	PS060048
50	-	PS060050
52	-	PS060052
54	-	PS060054
56	-	PS060056
58	-	PS060058
60	-	PS060060

BROCHE & BROCHE DE RÉDUCTION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CKW01015	BROCHE Ø 1,2 LG 150 TR/RD
CKW01003	BROCHE Ø 1,6 LG 100 TR/RD
CKW03001	BROCHE DE RÉDUCTION Ø 3,5

FRAISES PERCUTANÉES STÉRILES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CRE12008	SHANNON CORTA Ø2 LG 8
CRE12012	SHANNON RECTA Ø2 LG 12
CRE12212	SHANNON HÉLICOÏDALE Ø2 LG 12
CRE12222	SHANNON LONGA Ø2.2 LG 22
CRE13020	SHANNON LARGA Ø3 LG 20
CRE13030	SHANNON X-LARGA Ø3 LG 30
CRE23113	WEDGE Ø3.1 LG 13
CRE24113	WEDGE Ø4.1 LG 13

NOTES



T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 9

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE : PECA-2.0-L-ED3-01-26-FR