

B

BROCHURE

enovis™

PECAPLASTY®

CORRECTION PERCUTANÉE DE L'HALLUX VALGUS

HALLUX VALGUS



PECAPLASTY®

Le système Pecaplasty® permet une correction simple et reproductible de l'Hallux Valgus en chirurgie percutanée. Le guide permet le placement précis des broches et le positionnement parallèle des vis Peca® dans le métatarsien.

CARACTÉRISTIQUES - BREVET DÉPOSÉ

BROCHE DE TRACTION

Guidée par le tire-métatarsien dans le canal métatarsien, stabilise le guide

PALETTE

Positionnée contre la tête métatarsienne, parallèle au second métatarsien, permet la translation de la tête

POSITIONNEMENT PARALLÈLE

Des broches via les canons de visée

ADAPTOR

To assemble on the guide to fit the 1.6mm K-Wire sleeve.

POIGNÉE DE BROCHE DE TRACTION

Insertion de la broche de traction fixée à la poignée dans le canal métatarsien à travers l'incision percutanée initiale

MOLETTE DE TRANSLATION


Contrôle de la translation de la tête métatarsienne

MOLETTE DE VERROUILLAGE

Fixe la position de l'arc après positionnement


ARC COULISSANT

Réglage de la position du point d'insertion des broches

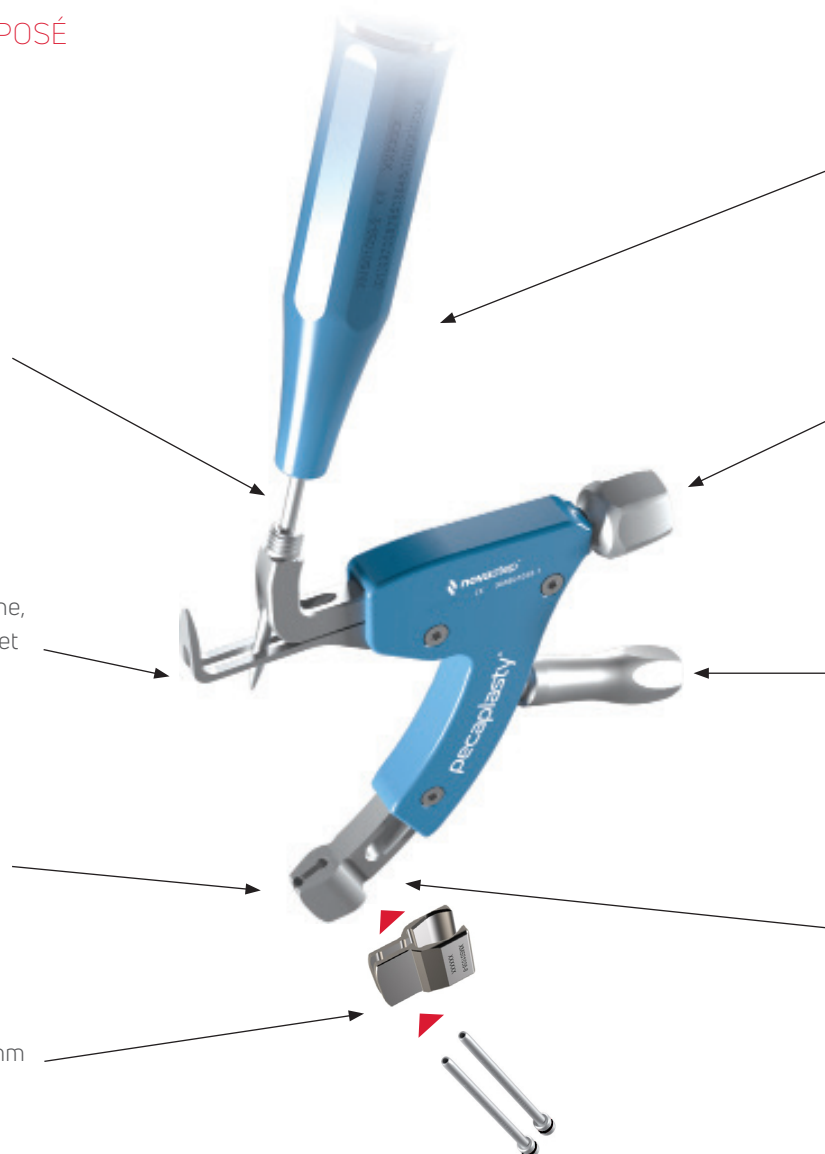


PROCÉDURE GUIDÉE & REPRODUCTIBLE

1. POSITIONNEMENT AISÉ SUR LE PIED

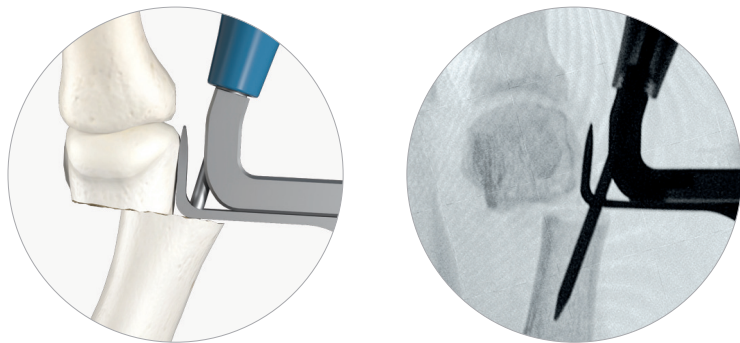


POSITIONNER le guide en insérant la palette sous la capsule médiale par l'incision initiale, après une ostéotomie transverse.

2. TRANSLATION CONTRÔLÉE DE LA TÊTE MÉTATARSIENNE

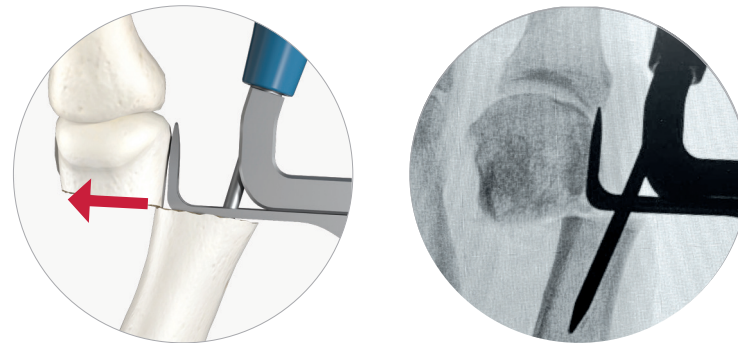

TRANSLATER la tête métatarsienne à l'aide de la molette de translation.


3. PLACEMENT PRÉCIS DES BROCHES

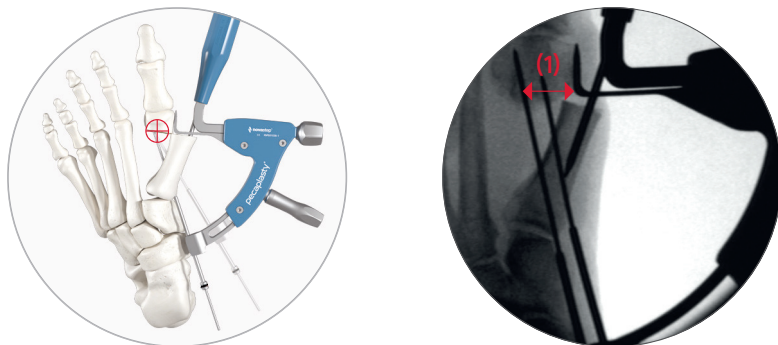

AJUSTER l'arc coulissant autour de son centre de rotation pour permettre le placement correct des broches.

- . Le point d'insertion doit être le plus proximal possible pour permettre une fixation bi-corticale.
- . Le point de visée est fixe, toujours à 14 mm (1) du bord de la palette.

RÉFÉRENCES

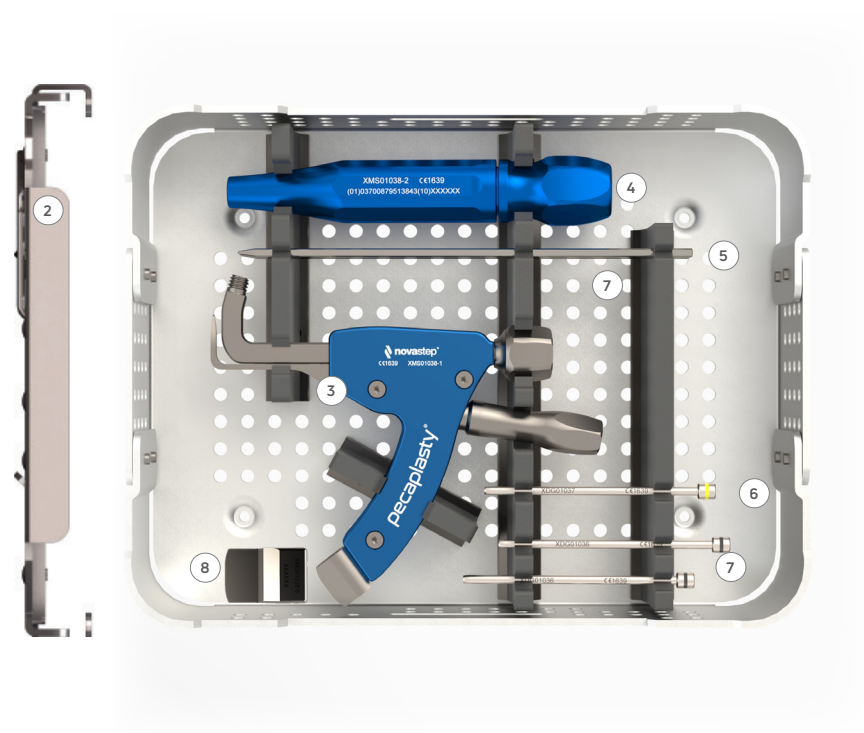

GUIDE VISEUR PECAPLASTY®

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	BOITE	ACC1019P0001	1
2	COUVERCLE	ACC1019P0002	1
3	GUIDE VISEUR	XMS01038-1	1
4	POIGNÉE POUR BROCHE DE TRACTION	XMS01038-2	1
5	BROCHE DE TRACTION Ø2.5 LG 128 - STÉRILE ⁽¹⁾ (2)	SKW06002	5
6	PECA® Ø3 - CANON	XDG01037	1
7	PECA® Ø4 - CANON	XDG01036	2
8	ADAPTATEUR GUIDE VISEUR	XMS01038-8	1

⁽¹⁾ Broche de traction stérile vendue séparément

⁽²⁾ Broche de traction non stérile également disponible (Ref: CKW06002)

NOTES

NOTES

NOTES



T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Legal manufacturer: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

Carefully read the enclosed Instructions For Use (IFU) and all packaging label information. Devices: Implants: Class IIb-CE1639 / Instruments: Class I / Class Ir-CE1639 / Class IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE : PECA-2.0-TAR-L-ED6-05-26-FR